

GlucoMen[®] areo

Einfach leicht messen.



1
Hände mit warmem Wasser reinigen, danach gut trocknen



2
Streifen entnehmen und Behälter sofort wieder verschließen



3
Streifen einführen, Gerät schaltet sich automatisch ein



4
Aufsatz an blauem Ring von Stechgerät abdrehen



5
Lanzette einführen und grüne Kappe abdrehen



6
Aufsatz festdrehen und die Stechtiefe einstellen



7
Stechgerät am hinteren Ende aufziehen



8
Stechgerät seitlich ansetzen und grünen Knopf drücken



9
Ein kleiner Blutstropfen ist völlig ausreichend



10
Streifenspitze an Blutstropfen ansetzen



11
Sobald genug Blut aufgesaugt wurde, erfolgt die Messung



12
Wert eintragen und entsprechend ihrer Therapie handeln



A.MENARINI
diagnostics

1120 Wien, Pottendorfer Strasse 25-27
Diabetes-Infoline: (01) 230 85 10
e-mail: office@menarini-diagnostics.at
www.glucomenareo.at

Für mich -
eine klare Entscheidung!

GlucoMen®

areo

Einfach leicht messen.



Markierung von Messwerten

Während der Anzeige des Blutzuckerwertes und vor Entfernen des Teststreifens besteht die Möglichkeit, den Messwert zu markieren.

-  **Markierung „vor einer Mahlzeit“**
-  **Markierung „nach einer Mahlzeit“**
-  **Markierung für Sport**
-  **Check-Symbol**

SICHERHEITSHINWEIS

Die Teststreifen dürfen nur in ihrem Originalbehälter aufbewahrt werden. Füllen Sie sie zum Schutz vor Beschädigung oder Verunreinigung nicht in andere Behälter um.

Den Behälter nach jeder Anwendung sofort wieder verschließen: Wenn der Behälter in Umgebungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit längere Zeit offen bleibt, können die Teststreifen den Blutzuckerwert überschätzen.

Wie rufe ich gespeicherte Ergebnisse wieder ab?

1. Vergewissern Sie sich, dass das Messgerät ausgeschaltet ist (halten Sie zum Ausschalten des Gerätes die Taste \odot 3 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Display ausschaltet).
2. Halten Sie die Taste \odot 2 Sekunden lang gedrückt, um das Messgerät einzuschalten und den Speicher aufzurufen (im Display erscheint das Symbol „mem“).
3. Das jüngste Messergebnis erscheint im Display. Das Display zeigt außerdem das Datum und die Uhrzeit des Tests sowie die zugehörigen Markierungen an.
4. Drücken Sie \blacktriangle und \blacktriangledown , um alle gespeicherten Daten zu durchlaufen.
5. Halten Sie die Taste \odot 3 Sekunden lang gedrückt, um das Messgerät auszuschalten.

Was bedeuten folgende Fehlermeldungen?

- Er 1** Hardwarefehler \rightarrow wenden Sie sich an unser Serviceteam (Tel. 01/230 85 10)
- Er 2** Teststreifen benutzt oder beschädigt \rightarrow verwenden Sie einen neuen Teststreifen
- Er 3** Blutprobenfehler \rightarrow einen neuen Teststreifen verwenden und mehr Blut auftragen
- Er 4** Teststreifen zu früh entfernt \rightarrow Messung mit einem neuen Teststreifen wiederholen

Produkte für Sie im Überblick



Blutzucker-Teststreifen
GlucoMen® areo Sensor

1 Packung enthält 50 Teststreifen.

PZN: 4243722
Produktcode: 46193

Lanzetten
Glucoject® Lancets Plus

1 Packung enthält 200 Lanzetten.

PZN: 4195271
Produktcode: 44123

